


Perfur do Brasil Ltda EPP

**Lobeflex**  
PERFURADOR DE LÓBULO DE ORELHA. *Baby*

# Conhecendo o Produto

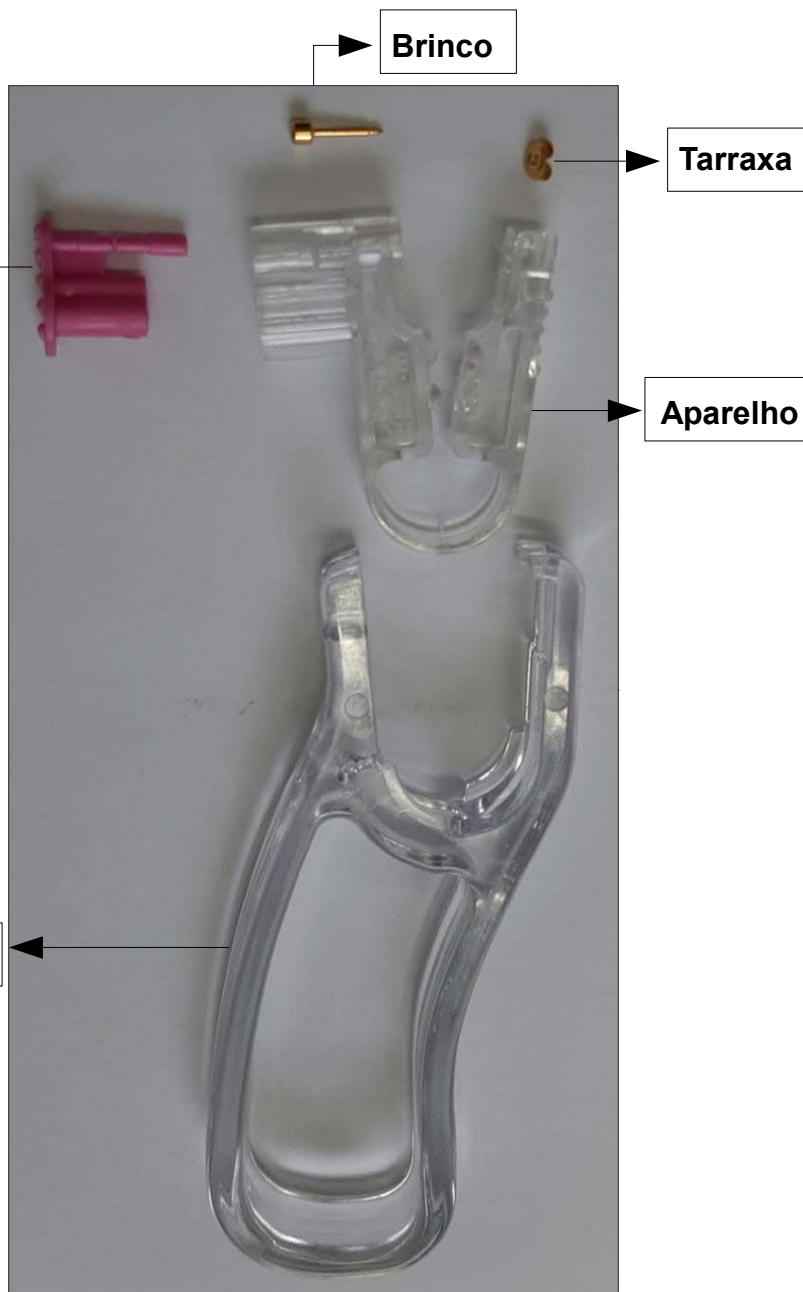

# Procedimento da Perfuração

- 1 - Certificar-se de estar com todo material necessário Lobeflex escolhido e verificar a validade do produto.
- 2 - Verificar a integridade do lóbulo a ser perfurado.
- 3 - Detalhar ao cliente o procedimento de aplicação e cuidados pós perfuração.
- 4 - Realizar a desinfecção das mãos e dos dois lados do lóbulo.



5 - Marcar simetricamente com a caneta tinta a base de violeta genciana, o ponto no lóbulo a ser perfurado, ou seja, os dois lados na mesma altura e distância do rosto.



6 - Confira a posição dos pontos marcados junto a ele com o auxilio de um espelho e sem tocar os lóbulos.

7 - Abrir a embalagem do brinco individualmente, retirar o aplicador com cuidado sem tocar a ponta do brinco ou a tarraxa, colocando o polegar no botão aplicador e o indicador na cavidade da tarraxa.

8 - Coloque o aparelho na empunhadura conforme ilustrado abaixo:






Risco de deslocamento da tarraxa



Forma **INCORRETA**  
de colocar o aparelho  
na empunhadura.

9 - Posicionar o lóbulo. Aproximar e posicionar o aplicador descartável, de forma que o lóbulo a ser perfurado fique no espaço de ajuste entre a ponta do pino do brinco e o alojamento da tarraxa.

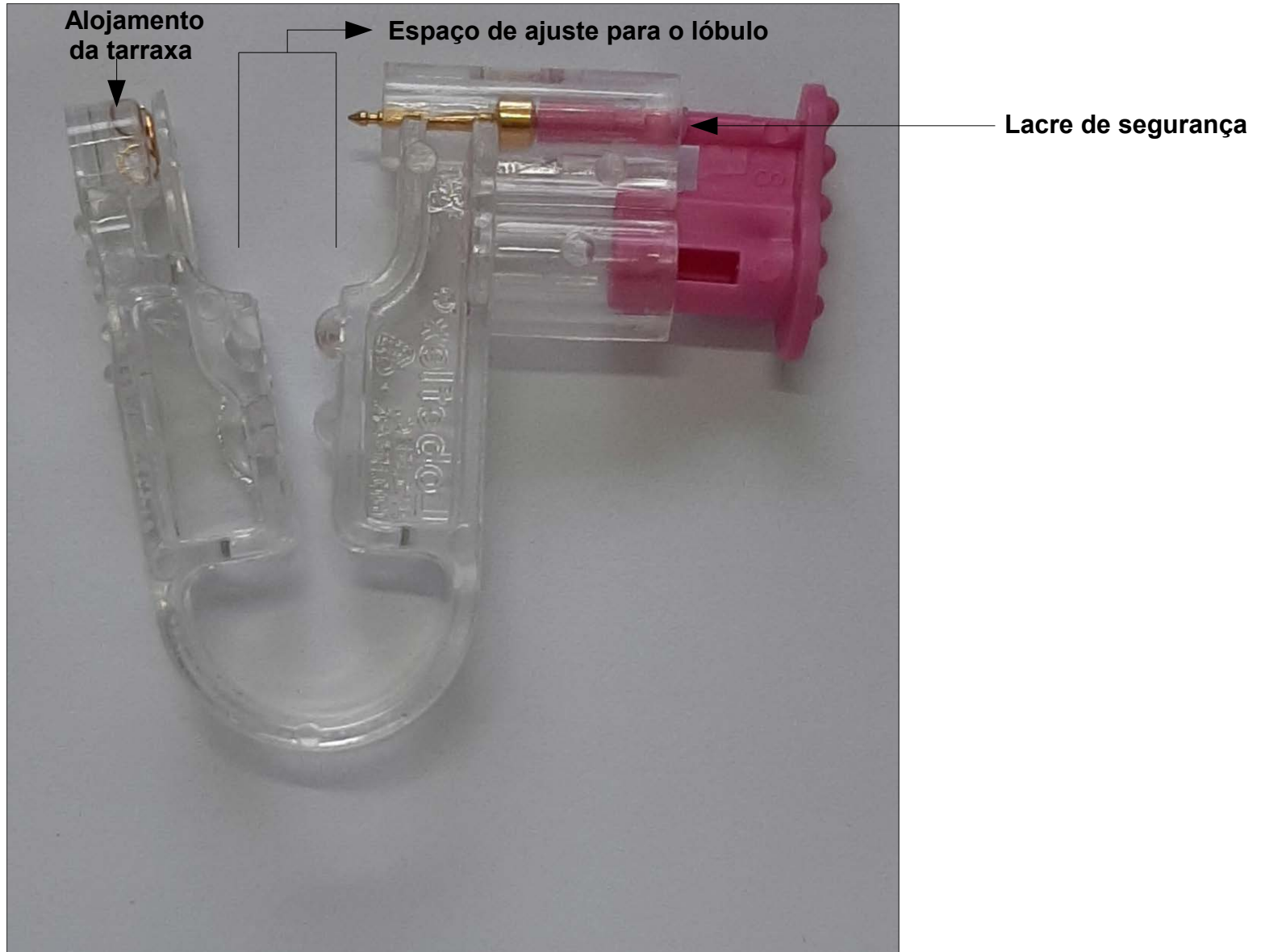

10 - Pressionar o aplicador suavemente para ajustar o lóbulo e alinhar a ponta do brinco, de acordo com o ponto previamente marcado.

**\*Cuidado! Não romper o lacre de segurança nesta etapa\***





11- Com o aplicador alinhado e na posição correta, pressionar o botão aplicador com mais força até o final do curso, rompendo assim os lacres de segurança impulsionando o brinco e fazendo simultaneamente e com precisão a perfuração do lóbulo e a colocação do brinco com respectivo encaixe na tarraxa.

**\*Certificar-se que o lacre foi totalmente rompido no momento da aplicação\***



12. Em seguida, movendo suave e cuidadosamente o aplicador para baixo, a tarraxa também deverá desencaixar-se do aplicador concluindo-se a aplicação e colocação do brinco.



Caixa com 24 pares



Modelos:

- 4 Pares Comum Cristal
- 4 Pares Comum Rose
- 6 Pares Comum Light Siam
- 4 Pares Comum Pérola
- 2 Pares Comum Violet
- 4 Pares Bolinha



*Perfur*<sup>®</sup>